



Intolerancia alimentaria

Prueba genética de intolerancia a la lactosa

Prueba genética de intolerancia a la fructosa

Pruebas genéticas de intolerancia al gluten

Material Suministrado

- 1 Hoja de instrucciones
- 3 Torundas de algodón
- 1 Bolsa de plástico para la muestra y la documentación
- 1 Volante de solicitud
- 2 Guantes de látex
- 1 Caja de transporte

Instrucciones (la toma se puede realizar cualquier día. Aconsejable de lunes a jueves)

-  1 Anotar en los envases de las torundas: apellidos, nombre, fecha de nacimiento, y fecha de obtención de la muestra.
-  2 No realizar la toma de muestras después de haber comido, enjuagarse la boca con abundante agua antes de iniciar el proceso y colocarse los guantes.
-  3 Con cada una de las torundas frotar un mínimo de 20 veces por la cara interna de la mejilla realizando a la vez movimientos de rotación. Es importante que durante el proceso, el resto de las personas presentes no hablen ni toquen la torunda.
-  4 Ir guardando cada una de las torundas en su envase correspondiente.
-  5 Guardar todas las torundas en el compartimento correspondiente de la bolsa de plástico.
-  6 Cumplimentar el volante de solicitud e introducirlo el bolsillo exterior de la bolsa de plástico.
-  7 Introducir la bolsa de plástico con las muestras y el volante de solicitud en la caja de transporte, llamar al transportista **Nacex (Tfno. 900 100 000)** y **realizar el envío al nº de abonado 1201/75** preferentemente el mismo día de la toma de la muestra.
-  8 Si surge cualquier problema llamar al **964 220 216**
-  9 Le avisaremos por correo-e en el momento que recibamos la muestra. 3 semanas después recibirá el informe con los resultados del análisis realizado.