

KIT INTOLERANCIA ALIMENTARIA GENÉTICA

TOMA DE MUESTRA



Kit dirigido al paciente o profesional para la recolección, conservación y transporte de muestras de mucosa bucal para su posterior análisis en laboratorio cualificado para determinar de manera cualitativa el riesgo a tener desarrollar una intolerancia genética alimentaria.

CONTENIDO DEL KIT:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud del laboratorio de destino
- 3 Torundas de algodón
- 2 Guantes de látex
- 1 Bolsa de plástico para los documentos
- 1 Caja de envío

PRECAUCIONES DE USO:

- No utilizar en el caso de que el paquete venga dañado o abierto. No reutilizar.
- Este kit no debe utilizarse para nada que no sea su uso previsto.

CONDICIONES GENERALES DE USO Y ENVÍO:

La toma de muestra puede realizarse cualquier día

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA:

1. Anotar en los envases de las torundas: apellidos, nombre, fecha de nacimiento, y fecha de obtención de la muestra.
2. No realizar la toma de muestras después de haber comido. Colocarse los guantes.
3. Con cada una de las torundas frotar un mínimo de 20 veces por la cara interna de la mejilla realizando a la vez movimientos de rotación. Es importante que, durante el proceso, el resto de las personas presentes no hablen ni toquen la torunda.
4. Ir guardando cada una de las torundas en su envase correspondiente.
5. Guardar todas las torundas en el compartimiento correspondiente de la bolsa de plástico.
6. Cumplimentar el volante de solicitud e introducirlo en el bolsillo exterior de la bolsa de plástico.
7. Introducir la bolsa de plástico con las muestras y el volante de solicitud en la caja de transporte, llamar al transportista preferentemente el mismo día de la toma de la muestra.

GESTIÓN DEL ENVÍO

Cumplimentar el volante de solicitud.

Introducir la muestra y el volante de solicitud en la caja de envío. Gestión del envío:

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: 1201.recogidas@nacex.es, con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a recogidascalderon.com

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.

En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web notificaps.aemps.es

Versión 1
23/01/2024



UDI Número de identificación único



No reutilizable



Limitación de temperatura



Referir al manual de instrucciones



Precauciones



Fabricante



LOT Número de lote de fabricación



Non estéril



Fecha de fabricación



IVD Diagnóstico in vitro



CE Marca CE



Fecha de caducidad



No usar si el empaquetado está dañado



AYALA SAMPLE KITS, S.L.
B-44749877
Paseo de la Universidad 48
12006, Castellón de la plana. Spain.
info.ayalampleskits@gmail.com