

# KIT ESTUDIO FECAL MICROBIOLÓGICO

## TOMA DE MUESTRAS



Kit dirigido al paciente o profesional para la recolección, conservación y transporte de muestras de heces para su posterior análisis en laboratorio cualificado para determinar la presencia de patógenos por cultivo.

### CONTENIDO DEL KIT:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud de laboratorio de destino
- 2 Frascos estériles suministrados fuera del kit
- 2 Torundas con medio de transporte amies viscosa
- 2 Bolsas refrigerantes
- 1 Caja de transporte

### CONDICIONES GENERALES DE USO Y ENVÍO:

- La toma de muestras se puede realizar exclusivamente de lunes a miércoles y no víspera de festivo
- El envío debe realizarse el mismo día de la toma de muestra

### INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA:

1. Congelar los refrigerantes y mantenerlos congelados hasta el momento del envío.
2. Obtener la muestra de heces del tamaño de una nuez en el frasco estéril.
3. Obtener una pequeña porción de la muestra con cada una de las 2 torundas de algodón tomando muestra de diferentes ubicaciones para cada una de ellas e introducirlas en los tubos que contienen el gel.
4. Introducir los tubos con las torundas, el frasco estéril y los refrigerantes previamente congelados en la bolsa de plástico.
5. Cumplimentar la hoja de solicitud e introducirla en el bolsillo exterior de la bolsa.
6. Colocar las muestras, el volante de solicitud, el justificante de pago y los refrigerantes en la caja de transporte y conservarlo todo en el refrigerador hasta la llegada del mensajero.

### GESTIÓN DEL ENVÍO

Introducir la muestra y el volante de solicitud en la caja de envío. Gestión del envío:

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: [1201.recogidas@nacex.es](mailto:1201.recogidas@nacex.es), con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a [recogidascalderson.com](http://recogidascalderson.com)

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.

### PRECAUCIONES DE USO:

No utilizar en el caso de que el paquete venga dañado o abierto

No reutilizar

Este kit no debe utilizarse para nada que no sea su uso previsto

*En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web [notificaps.aemps.es](http://notificaps.aemps.es)*

Versión 2  
Revisión  
22/01/2024




UDI Número de identificación único



No reutilizable



Limitación de temperatura

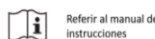

Referir al manual de instrucciones



Precauciones



Fabricante

LOT Número de lote de fabricación



No estéril



Fecha de fabricación




Diagnóstico in vitro



Marca CE



Fecha de caducidad

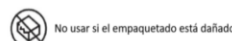

No usar si el empaquetado está dañado

AYALA SAMPLE KITS, S.L.  
B-44749877  
Paseo de la Universidad 48  
12006, Castellón de la plana. Spain.  
[info.ayalasamplekits@gmail.com](mailto:info.ayalasamplekits@gmail.com)