

# KIT ESTUDIO FECAL BIOQUÍMICO

## TOMA DE MUESTRAS



Kit dirigido al paciente o profesional para la recolección, conservación y transporte de muestras de heces para su posterior análisis en laboratorio cualificado para determinar el estado de marcadores de la digestión, marcadores de inflamación e indicadores de integridad de la mucosa intestinal.

### CONTENIDO DEL KIT:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud del laboratorio de destino
- 3 Botes estériles para contener heces\*
- 1 Bolsa de plástico para documentación
- 2 Bolsas refrigerantes
- 1 Caja de transporte

### CONDICIONES GENERALES DE ENVÍO Y USO:

- > La toma de muestras se puede realizar exclusivamente de lunes a miércoles, nunca víspera de festivo
- > El envío debe realizarse el mismo día de la toma de muestra

\*suministrados fuera del kit

### INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA:

1. Congelar los refrigerantes y mantenerlos congelados hasta el momento del envío.
2. Obtener la cantidad suficiente de heces para llenar por la mitad los tres botes estériles.
3. Introducir los botes en la bolsa de plástico junto con los refrigerantes.
4. Colocar las muestras y el volante de solicitud en la caja de transporte para proceder al envío al laboratorio en el mismo día de la obtención de la muestra.
5. Mantener la caja en el refrigerador hasta la llegada del mensajero

### GESTIÓN DEL ENVÍO

Introducir la muestra y el volante de solicitud en la caja de envío. Gestión del envío:

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: [1201.recogidas@nacex.es](mailto:1201.recogidas@nacex.es), con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a [recogidascalderson.com](http://recogidascalderson.com)

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.

### PRECAUCIONES DE USO:

No utilizar en el caso de que el paquete venga dañado o abierto

No reutilizar

Este kit no debe utilizarse para nada que no sea su uso previsto

*En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web [notificaps.aemps.es](http://notificaps.aemps.es)*

Versión 2  
25/01/2024



UDI Número de identificación único

LOT Número de lote de fabricación

No reutilizable

NON-STERILE No estéril

Limitación de temperatura

Fecha de fabricació

Referir al manual de instrucciones

IVD Diagnóstico in vitro

Precauciones

CE Marca CE

Fabricante

Fecha de caducidad

No usar si el empaquetado está dañado

AYALA SAMPLE KITS, S.L.  
B-44749877  
Paseo de la Universidad 48  
12006, Castellón de la plana. Spain.  
[info.ayalasamplekits@gmail.com](mailto:info.ayalasamplekits@gmail.com)