



KIT TOMA DE MUESTRA DE HECES

FINALIDAD PREVISTA: kit dirigido al paciente o profesional para la recolección, conservación y transporte de muestras de heces para su posterior análisis en laboratorio cualificado para obtener información relacionada con la salud del ecosistema intestinal.

CONTENIDO DEL KIT:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud del laboratorio de destino
- 1 Frasco estéril
- 1 Bolsa de plástico para documentación
- 1 Bolsa refrigerante
- 1 Caja de transporte

CONDICIONES GENERALES DE ENVÍO Y USO:

La toma de muestras se puede realizar exclusivamente de lunes a miércoles, nunca víspera de festivo.

El envío debe realizarse el mismo día de la toma de muestra.

Helicobacter pylori: Se recomienda no estar bajo tratamiento antibiótico en el momento de la toma de muestras.

PRECAUCIONES DE USO:

Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.

No utilizar en el caso de que el paquete venga dañado o abierto.

No reutilizar.

Este kit no debe utilizarse para nada que no sea su uso previsto.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA:

1. Congelar la bolsa refrigerante y mantenerla congelada hasta el momento del envío.
2. Obtener la cantidad suficiente de heces para llenar hasta tres cuartos el bote.
3. Introducir el bote en la bolsa de plástico junto con el refrigerante.
4. Colocar la muestra y el volante de solicitud en la caja de transporte para proceder al envío al laboratorio en el mismo día de la obtención de la muestra.
5. Mantener la caja en el refrigerador hasta la llegada del mensajero.

GESTIÓN DEL ENVÍO

Introducir la muestra y el volante de solicitud en la caja de envío. Gestión del envío:

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: 1201.recogidas@nacex.es, con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a recogidascalderon.com

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.



Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.



Precauciones



Fecha de caducidad



No usar si el paquete está dañado



Fecha de fabricación



Número de identificación único



Limitación de temperatura



Fabricante



Número de lote de fabricación



Referencia producto



Producto sanitario para diagnóstico in vitro



Referir al manual de instrucciones



No estéril



No reutilizable

En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web notificaps.aemps.es

