

KIT ESTUDIO FECAL: LEVADURAS EN HECES

TOMA DE MUESTRAS

Kit dirigido al paciente o profesional para la recolección, conservación y transporte de muestras de heces para su posterior análisis en laboratorio cualificado para determinar la presencia de levaduras y su identificación.

CONTENIDO DEL KIT:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud del laboratorio de destino
- 1 Hisopo con medio de transporte amies viscosa
- 1 Frasco estéril*
- 1 Caja de envío
- 1 Bolsa para documentos
- 1 Bolsa nevera
- 1 Paquete refrigerante


CONDICIONES DE USO Y ENVÍO:

- > Se recomienda no estar bajo tratamiento antibiótico en el momento de la toma de muestras.
- > Realizar el envío el mismo día de la toma de muestras. Una vez obtenida la muestra, conservarla en el refrigerador hasta el momento del envío.

*suministrado fuera del kit

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA:

- Cumplimentar el volante de solicitud.
- Cuando reciba el kit, introduzca el paquete refrigerante en el congelador durante al menos 8h para que esté completamente congelado.
- Obtenga una muestra de heces e introduzca un volumen equivalente a una nuez en el frasco estéril.
- Introducir el hisopo verticalmente en diferentes puntos de la muestra de heces contenida en el frasco de forma que quede impregnado y después introduzca el hisopo en el tubo de medio de transporte con tapón azul. Es importante que solo se obtenga la cantidad justa de muestra para que el hisopo quede impregnado, cualquier exceso de muestra debe ser eliminado antes de introducirlo definitivamente en el tubo con tapón azul.
- Cierre el tubo con el tapón azul y cierre el frasco con la muestra de heces.
- Introduzca el frasco y el tubo con las muestras junto con el paquete refrigerante previamente congelado en la bolsa nevera.
- Introduzca la bolsa con los documentos y la bolsa nevera con las muestras en la caja de transporte y gestionar el envío con el laboratorio de destino según sus indicaciones.
- Conservar refrigerado hasta la recogida.

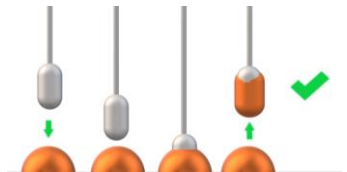

GESTIÓN DEL ENVÍO

Introducir la muestra y el volante de solicitud en la caja de envío. Gestión del envío:

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: 1201.recogidas@nacex.es, con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a recogidascalderon.com

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.

PRECAUCIONES DE USO:

No utilizar en el caso de que el paquete venga dañado o abierto. No reutilizar
Este kit no debe utilizarse para nada que no sea su uso previsto

En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web notificaps.aemps.es

Versión 2
24/01/2024



Número de
identificación único



No reutilizable



Limitación de
temperatura



Referir al manual de
instrucciones



Precauciones



Fabricante



Fecha de caducidad



Número de lote de
fabricación



No estéril



Fecha de fabricació



Diagnóstico in vitro



Marca CE



No usar si el empaquetado está dañado



AYALA SAMPLE KITS, S.L.
B-44749877
Paseo de la Universidad 48
12006, Castellón de la plana. Spain.
info.ayalasamplekits@gmail.com