

# KIT S+ AUTOTOMA Y TOMA PROFESIONAL

## TOMA DE MUESTRA



Kit dirigido al paciente o profesional para la recolección, conservación y transporte de muestras de sangre para su posterior análisis en laboratorio cualificado para determinar una sensibilidad de tipo alimentario.

### CONTENIDO DEL KIT:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud del laboratorio de destino
- 1 Gasa empapada en alcohol
- 1 Tubo de recolección de sangre capilar
- 2 Lancetas (no suministrado, comprar en farmacia)
- 1 Contenedor transporte
- 1 Bolsa para documentación
- 1 Caja de envío

### CONDICIONES GENERALES DE USO Y TRANSPORTE:

- Se debe obtener la muestra de lunes a jueves.
- Es imprescindible realizar el envío de la muestra el mismo día de su obtención.
- Conservar en nevera hasta el envío.
- Preferentemente estar en ayunas.
- No haber tomado antihistamínicos, inmunosupresores ni corticoides durante los 7 días previos a la toma de muestras.

*Nota: no suprima los tratamientos sin consultar previamente con su médico*


### INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRAS:

#### Preparación para la obtención de la muestra

1. Lavar las manos con agua tibia y jabón, enjuagar y secar bien con toalla limpia
2. Desinfectar la piel de la yema del dedo sobre el que se va a realizar la punción (preferentemente el dedo corazón de la mano izquierda), usando la gasa empapada en alcohol y dejar secar
3. Destapar el tubo de tapón verde de forma que la sangre pueda introducirse en su interior con facilidad

#### Proceder a la punción empleando la lanceta, para ello:

4. Girar y extraer el protector de seguridad
5. Presionando la falange del dedo con el fin de retener la circulación, presionar la lanceta contra el punto de punción elegido y apretar el disparador.
6. Colocar inmediatamente el dedo sobre el tubo de forma que las gotas de sangre puedan introducirse en su interior.
7. Mantener durante el proceso la presión sobre el dedo hasta obtener un mínimo de 4 gotas de sangre.
8. Si con una punción no se obtuviera la cantidad de sangre requerida sería necesario realizar otra punción siguiendo los mismos pasos que en la primera.
9. Volver a tapar el tubo con el tapón verde y agitar suavemente
10. Una vez concluido el proceso volver a desinfectar la zona con alcohol.
11. Introducir el tubo en el envase porta-tubos.

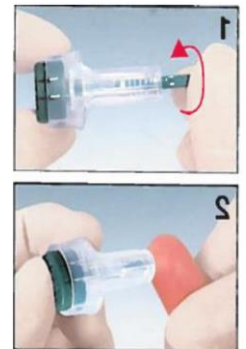

### GESTIÓN DEL ENVÍO

Introducir la muestra y el volante de solicitud en la caja de envío. Gestión del envío:

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: [1201.recogidas@nacex.es](mailto:1201.recogidas@nacex.es), con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a [recogidascalderon.com](http://recogidascalderon.com)

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.

### PRECAUCIONES DE USO:

Lea atentamente las instrucciones de uso.

No utilizar en caso de que el paquete venga dañado o abierto.

No reutilizar.

Este kit no debe utilizarse para otro fin que no sea su uso previsto.



Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.



Número de identificación único



Número de lote de fabricación



Referir al manual de instrucciones



Precauciones



Fecha de caducidad



Limitación de temperatura



Referencia producto



No estéril



No usar si el paquete está dañado



Fecha de fabricación



Fabricante



Producto sanitario para diagnóstico in vitro



No reutilizable

*En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web [notificaps.aemps.es](http://notificaps.aemps.es)*

Versión 2  
22/02/2024



AYALA SAMPLE KITS, S.L.  
Paseo de la Universidad 48  
ESC. 1 BAJA 13  
Castellón de la Plana  
12006 Spain