

KIT HPV HOMBRE AUTOTOMA

TOMA DE MUESTRA



CALDERÓN
CENTRO DIAGNÓSTICO

FINALIDAD PREVISTA: Kit dirigido al paciente o profesional para la recolección, conservación y transporte de muestra genital para su posterior análisis en laboratorio cualificado para determinar de manera cualitativa la presencia de patógenos de transmisión sexual mediante PCR a tiempo real.

CONTENIDO DEL KIT:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud del laboratorio de destino
- 1 Torunda seca
- 1 Caja de envío

PRECAUCIONES DE USO:

- Lea atentamente las instrucciones antes de su uso.
- No utilizar en el caso de que el paquete venga dañado o abierto.
- No reutilizar.
- Este kit no debe utilizarse para nada que no sea su uso previsto.

CONDICIONES GENERALES DE USO Y TRANSPORTE:

Condiciones previas:

- Realizar la toma de muestras cualquier día de la semana.
- Es recomendable realizar el envío en el primer día laborable tras la toma de muestras.
- Se recomienda no lavar la zona genital antes de la toma de muestras.
- No es necesario que el transporte de la muestra se realice en condiciones de refrigeración, pero sí que es recomendable mantener la muestra a 4° C hasta el momento del envío, sobre todo cuando este no se vaya a realizar el mismo día de la toma de muestras.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA:

- Humedecer la torunda con el suero fisiológico estéril
- Frotar con la torunda humedecida en la entrada del meato uretral, y después una frotación vigorosa desde la zona distal a la proximal y de izquierda a derecha en glande, frenillo, surco de la corona, corona y mucosa subprepuial. A continuación, realizar la toma frotando vigorosamente en el eje del pene y escroto.
- Desenroscar el tapón e introducir la torunda en el frasco con el medio de transporte.
- Romper la parte superior del hisopo a la altura de la muesca destinada a tal efecto, de forma que la parte correspondiente a la muestra quede introducida dentro del medio líquido de transporte.
- Cerrar el tapón del tubo con la muestra en su interior.
- Introducir el tubo en la caja de envío.
- Conservar refrigerado hasta el momento del envío
- Gestionar el envío según indicaciones del laboratorio de destino

GESTIÓN DEL ENVÍO

Introducir la muestra y el volante de solicitud en la caja de envío. Gestión del envío:

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: 1201.recogidas@nacex.es, con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a recogidascalderson.com

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.



AYALA SAMPLE KITS, S.L.
Paseo de la Universidad 48
ESC. 1 BAJA 13
Castellón de la Plana
12006 Spain

En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web notificaps.aemps.es

	Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.		Precauciones		No usar si el paquete está dañado
	Número de identificación único		Fecha de caducidad		Fecha de fabricación
	Número de lote de fabricación		Limitación de temperatura		Fabricante
	Referir al manual de instrucciones		Referencia producto		Producto sanitario para diagnóstico in vitro
			No estéril		No reutilizable

Versión 2
26/02/2024