

KIT ETS-HPV MUJER AUTOTOMA

TOMA DE MUESTRA



CALDERÓN
CENTRO DIAGNÓSTICO

FINALIDAD PREVISTA: Kit dirigido al paciente o profesional para la recolección, conservación y transporte de muestras vaginales para su posterior análisis en laboratorio cualificado para determinar la presencia de enfermedades de transmisión sexual y HPV.

CONTENIDO DEL KIT:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud del laboratorio de destino
- 1 Dispositivo con sistema autotoma
- 1 Caja de envío

PRECAUCIONES DE USO:


- Lea detenidamente las instrucciones antes de su uso.
- No utilizar en el caso de que el paquete venga dañado o abierto.
- No reutilizar.
- Este kit no debe utilizarse para nada que no sea su uso previsto.

CONDICIONES GENERALES DE USO Y TRANSPORTE:

- La autotoma se recomienda únicamente en caso de no existir sintomatología. En caso contrario es aconsejable acudir a un profesional médico o enfermero para que realice la toma de muestras.
- Realizar la toma de muestras cualquier día de la semana.
- Es recomendable llevar la muestra al laboratorio en el primer día laborable después de la toma de muestras.
- Se recomienda no lavar la zona genital antes de la toma de muestras.
- No es necesario que el transporte de la muestra se realice en condiciones de refrigeración, pero sí que es recomendable mantener la muestra a 4° C hasta el momento de llevar la muestra al laboratorio, sobre todo cuando este no se vaya a realizar el mismo día de la toma de muestras.
- No realice la toma de muestras durante la menstruación o si sufre algún sangrado irregular.
- Si ha tenido relaciones sexuales o se ha puesto algún tipo de crema u óvulos espere algunos días para realizar la toma de muestras.
- Hipersensibilidad a algún componente: si después de la toma de muestras siente alguna molestia (irritación, sensación de ardor, hinchazón vulvar), póngase en contacto con su ginecólogo lo antes posible.
- Pequeños sangrados: si experimenta pequeños sangrados después del uso del dispositivo no se preocupe, se detendrá en unas pocas horas. En caso contrario, consulte a su ginecólogo.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA:

1. Lavarse las manos con jabón y sacar el dispositivo de su envase.
2. Inserción en la vagina: introducir por el extremo opuesto al mango con forma de flor, como si se tratase de un tampón vaginal, sujetando por su extremo posterior y con la otra mano para ayudarse en la maniobra. Si experimenta una ligera incomodidad o molestia al introducir el dispositivo, es normal, trate de relajarse para evitar la contracción de los músculos vaginales y facilitar el deslizamiento del dispositivo. En ese caso también puede ayudar si moja con suero fisiológico estéril la superficie del dispositivo.
3. Deslizamiento: Una vez introducido en la vagina, mediante ligera presión, empujar el émbolo hacia el interior de su cuerpo. De esta manera el dedal queda en contacto con el cuello uterino.
4. Recolección: Realizar 2 ó 3 giros sujetando el dispositivo con una sola mano por la parte que queda en el exterior de la vagina. Las células del cuello uterino quedarán adheridas a la superficie del dedal recolector. Una vez hecho esto retirar el dispositivo girando levemente para tomar muestra de la mucosa vaginal al salir.
5. Protección del dedal recolector: Tapar el dedal recolector del dispositivo por el extremo con el tapón adjunto.
6. Conservar la muestra en el refrigerador hasta el momento de llevarla al laboratorio
7. Introducir el dispositivo en la caja de envío.

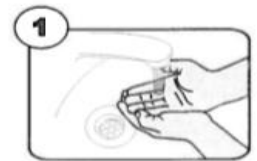

GESTIÓN DEL ENVÍO

Introducir la muestra y el volante de solicitud en la caja de envío. Gestión del envío:

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: 1201.recogidas@nacex.es, con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a recogidascalderson.com

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.



Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro.



Número de identificación único



Número de lote de fabricación



Referir al manual de instrucciones



Precauciones



Fecha de caducidad



Limitación de temperatura



Referencia producto



No estéril



No usar si el paquete está dañado



Fecha de fabricación



Fabricante



Producto sanitario para diagnóstico in vitro



No reutilizable

En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web notificaps.aemps.es

Versión 2
22/02/2024



AYALA SAMPLE KITS,S.L.
Paseo de la Universidad 48
ESC. 1 BAJA 13
Castellón de la Plana
12006 Spain