

KIT MINERALES TÓXICOS EN CABELLO

Kit dirigido al paciente o profesional para la recolección, conservación y transporte de muestras de cabello para su posterior análisis en laboratorio cualificado para determinar de manera cualitativa la presencia de minerales tóxicos en cabello.

CONTENIDO DEL KIT:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Volante de solicitud del laboratorio de destino
- 1 Báscula de cartón
- 1 Bolsa de plástico para el cabello
- 1 Sobre de envío

CONDICIONES GENERALES DE USO Y ENVÍO:

1. Preferentemente remitir el cabello sin tintes ni contaminantes externos (permanentes, champús especiales, etc.)
2. Se recomienda tomar el cabello un mes después de haber sido teñido.
3. Se recomienda escoger las porciones más recientes y que no se vean teñidas.
4. De manera excepcional utilizar cabello de la zona púbica (en caso de no disponer de cabello en la cabeza). Indicar claramente en el volante la zona de recolección del cabello.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MUESTRA:

- > Colocar la tarjeta-báscula doblando las lengüetas para proporcionar un punto de apoyo y ponerla sobre una superficie plana.
- > Cortar mechones de cabello por la parte más cercana al cuero cabelludo y a la altura de la nuca, empleando unas tijeras de acero inoxidable, en cantidad suficiente para el análisis. Lo ideal es cortar de 5 ó 6 áreas diferentes de la nuca.
- > A medida que se va obteniendo cada mechón de pelo, cortar los 2,5 cm más cercanos al cuero cabelludo despreciando el resto. Coloque el pelo guardado en el círculo de la báscula destinado a tal efecto hasta obtener la cantidad de 0,25 gramos, en ese momento la báscula se inclinará hacia el lado que ha depositado el cabello.
- > Etiquetar la bolsa de plástico con el nombre del paciente y fecha de obtención de la muestra e introducir la muestra de pelo en su interior.

GESTIÓN DEL ENVÍO

Cumplimentar el volante de solicitud.

Introducir la muestra y el volante de solicitud en la caja de envío. Gestión del envío:

Para ello existen 3 opciones:


- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: 1201.recogidas@nacex.es, con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a recogidascalderson.com

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al 964220216.

PRECAUCIONES DE USO: No utilizar en el caso de que el paquete venga dañado o abierto. No reutilizar. Este kit no debe utilizarse para nada que no sea su uso previsto

En caso de incidente grave relacionado con el producto el usuario debe comunicarse con el fabricante y la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido. El contacto de la autoridad competente española es a través de la web notificaps.aemps.es

Versión 1
23/01/2024

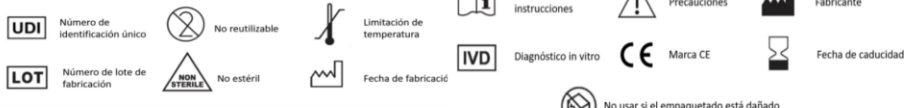

AYALA SAMPLE KITS, S.L.
B-44749877
Paseo de la Universidad 48
12006, Castellón de la plana. Spain.
info.ayalasamplekits@gmail.com