

TOMA DE MUESTRA PARA EL TEST

HPV HOMBRE

Material suministrado:

- 1 Hoja de instrucciones
- 1 Torunda seca
- 1 Volante de solicitud del laboratorio de destino
- 1 Sobre de envío

Precauciones de uso:

Lea atentamente las instrucciones antes de su uso.
No utilizar en el caso de que la torunda venga dañada o abierta.
No reutilizar.
Este producto no debe utilizarse para nada que no sea su uso previsto.

Condiciones generales de uso y transporte:

- Realizar la toma de muestras cualquier día de la semana.
- Es recomendable realizar el envío en el primer día laborable tras la toma de muestras.
- Se recomienda no lavar la zona genital antes de la toma de muestras.
- No es necesario que el transporte de la muestra se realice en condiciones de refrigeración, pero sí que es recomendable mantener la muestra a 4º C hasta el momento del envío, sobre todo cuando este no se vaya a realizar el mismo día de la toma de muestras.

Instrucciones para la toma de muestra:

1. Para mayor comodidad se podría humedecer la torunda en suero fisiológico.
2. Frotar con la torunda en la entrada del meato uretral, y después una frotación vigorosa desde la zona distal a la proximal y de izquierda a derecha en glande, frenillo, surco de la corona, corona y mucosa subprepuclal. A continuación, realizar la toma frotando vigorosamente en el eje del pene y escroto.
3. Introducir la torunda en el frasco y cerrar.
4. Introducir el tubo en la caja de envío.
5. Conservar refrigerado hasta el momento del envío.
6. Gestionar el envío según indicaciones del laboratorio de destino.

Gestión del envío:

Introducir la muestra y el volante de solicitud en la caja de envío. Gestión del envío:

Para ello existen 3 opciones:

- Llamar a Nacex por teléfono: **964 254 032** e indicar que necesita realizar un envío a portes debidos al número de abonado 1201/75.
- Enviar un correo electrónico a: **1201.recogidas@nacex.es**, con los siguientes datos imprescindibles: Fecha y hora de recogida (mínimo franja de 2 horas), Nombre y apellidos, Dirección completa, Empresa / Negocio (solo en el caso que no se recoja en el domicilio particular), Código Postal, Población, Provincia, Teléfono.
- Rellenar el cuestionario, accediendo a recogidascalderson.com

En caso de tener algún problema o duda a lo largo del proceso, llame al **964220216**.

COMPONENTE	FABRICANTE COMPONENTE
Torunda seca	SARSTEDT AG & Co. KG